

Pistol de masaj cu vibrații 100W



Instrucțiuni de utilizare
Traducerea instrucțiunilor originale

REGULI DE SIGURANȚĂ

1. Utilizați în conformitate cu aceste recomandări. A nu se utiliza de către copii.
2. Zona masată trebuie să fie curată.
3. Aparatul de masaj nu trebuie utilizat într-un mediu exploziv, de exemplu, în prezența unor lichide, gaze sau praf inflamabile.
4. Echipamentele electrice sunt o sursă de scânteii care pot aprinde gaze sau alte particule în suspensie în aer.
5. În timpul masajului, copiii și alte persoane din apropiere trebuie ținute la distanță de echipament.
6. Fiți prudenți, concentrați-vă pe efectuarea activităților și folosiți bunul simț atunci când lucrați cu echipamentul de masaj. Nu utilizați pistolul de masaj dacă vă simțiți obosit sau dacă sunteți sub influența narcoticelor, alcoolului sau a drogurilor. Un moment de neatenție în timpul masajului poate duce la vătămări grave.
7. Nu trebuie să se producă o declanșare accidentală. Înainte de a introduce, înlocui bateria sau de a transporta unitatea, asigurați-vă că întrerupătorul de alimentare este în poziția OFF. Transportarea aparatului de masaj cu degetul pe întrerupător, sau dacă acesta este în funcțiune, poate provoca un accident.
8. Nu scufundați aparatul în apă și nu permiteți ca apa să pătrundă în aparat prin orificii.
9. Mențineți întotdeauna o poziție bună și un echilibru bun în timpul masajului. Acest lucru va asigura un control mai bun al dispozitivului în situații neașteptate.
10. Încărcați bateria din pistolul de masaj numai cu ajutorul încărcătorului furnizat împreună cu dispozitivul.
11. Scoateți hainele largi și bijuteriile înainte de a începe masajul. Țineți părul, hainele și mănușile departe de piesele în mișcare. Piesele în mișcare se pot prinde de hainele largi, de bijuterii sau pot trage în părul lung.
12. Verificați cu atenție starea dispozitivului și a bateriei înainte de utilizare.
13. Nu apăsați prea tare aparatul de masaj pe corp. Pentru ca masajul să fie eficient, trebuie să folosiți un vârf adecvat.
14. Nu utilizați dispozitivul cu un întrerupător deteriorat. În cazul în care dispozitivul nu poate fi utilizat poate prezenta un pericol, caz în care acesta trebuie dus imediat la reparat.
15. Asigurați-vă că întrerupătorul de alimentare este în poziția OFF înainte de a modifica setările, de a înlocui bornele sau de a depozita aparatul. Aceste măsuri de precauție reduc riscul de pornire accidentală a aparatului de masaj.
16. Pistolul de masaj trebuie să fie depozitat în afara razei de acțiune a copiilor și nu trebuie utilizat de persoane care nu sunt familiarizate cu aceste recomandări și cu regulile de funcționare. Pistolul de masaj poate deveni periculos în mâinile unei persoane care nu este familiarizată în mod corespunzător cu regulile de utilizare a aparatului.
17. Pistolul de masaj trebuie utilizat în conformitate cu recomandările cuprinse în manualul de instrucțiuni. Utilizarea echipamentului în alte scopuri decât cele pentru care a fost destinat poate fi periculoasă.

NOTIFICARE ȘI AVERTIZARE

1. Este interzisă scufundarea produsului în apă. Acesta trebuie protejat de contactul cu lichidele și sursele de căldură. Orificiile de ventilație trebuie menținute întotdeauna curate.
2. Nu dezasamblați dispozitivul.
3. Dispozitivul nu trebuie să funcționeze continuu mai mult de o oră. Ar trebui să existe o pauză de cel puțin 30 de minute înainte de a fi utilizat din nou.
4. Deconectați încărcătorul atunci când încărcarea este completă sau înainte de a începe lucrul.
5. Numai pentru adulți. Nu folosiți dispozitivul pe zonele rănite.

Pistolul de masaj este un dispozitiv de vibrații portabil, reîncărcabil. După un efort intens, acesta poate ameliora eficient durerile cauzate de acumularea de acid lactic în organism și poate calma durerile musculare la persoanele culcate - consultați medicul înainte de a utiliza dispozitivul.

LIMITĂRI

Persoanele care îndeplinesc oricare dintre condițiile enumerate mai jos trebuie să consulte un medic înainte de a utiliza aparatul de masaj:

1. Femeile gravide.
2. Persoane cu stimulator cardiac.
3. Persoanele care au suferit recent o intervenție chirurgicală.
4. Persoane cu defecte ale coloanei vertebrale, ale articulațiilor sau ale oaselor.
5. Persoanele care au complicații cauzate de alte boli (cum ar fi neuropatia sau afectarea retinei).

DESCRIEREA PRODUSULUI

- motor fără perii super silențios și puternic
- baterie integrată
- setarea vitezei
- ușor, fără fir
- pornire/oprire

CAPACE DE CAPĂT INTERSCHIMBABILE



- 1. Capul plat:** Ajută la masarea punctuală a grupurilor musculare mai mici și mai mari. După masaj puteți simți o ușurare imediată.
- 2. Vârf rotund** - Potrivit pentru masarea tuturor mușchilor, precum și pentru relaxarea mușchilor înainte și după exerciții fizice.
- 3. Capătul în formă de U** - Potrivit pentru mușchii de pe ambele părți ale coloanei vertebrale. Vârful în formă de "U" evită coloana vertebrală și vertebrele cervicale (nu trebuie utilizat direct pe coloana vertebrală și vertebrele cervicale, deoarece le-ar putea afecta fizic).
- 4. Vârful degetelor** - Potrivit pentru masajul picioarelor și al mâinilor. Este mic, dar poate crea o mare energie.
- 5. Vârf în formă de pană** - are o formă îngustă și este conceput pentru masajul foarte profund al țesuturilor.
- 6. Vârf în formă de con** - Vă permite să vă relaxați eficient mușchii concentrându-vă pe punctele de declanșare.

RECRUITING

- Încărcați bateria timp de aproximativ 6 ore înainte de prima utilizare.
- Pentru a încărca pistolul de masaj, conectați un capăt al cablului de încărcare inclus la o priză electrică și celălalt capăt la portul de încărcare de pe pistolul de masaj.
- Fâșia LED de pe indicatorul luminos al bateriei clipește pentru a arăta nivelul de încărcare a bateriei și încărcarea activă.

GARANȚIA NU ACOPERĂ:

- deteriorări cauzate de accidente, utilizare greșită, manipulare sau transport necorespunzător,
- unități supuse unor reparații neautorizate,
- utilizarea contrară instrucțiunilor,
- daune care depășesc prețul produsului,
- deteriorarea calității produsului livrat ca urmare a unei depozitări sau securități necorespunzătoare.

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

- După fiecare utilizare, ștergeți capetele de masaj cu o cârpă umedă.
- Folosiți o cârpă sau un prosop umed pentru a curăța aparatul și apoi ștergeți-l cu o cârpă curată și uscată. Asigurați-vă că nu intră apă în aparat.
- După ce ați terminat de utilizat dispozitivul, trebuie să îl opriți.
- Nu utilizați dispozitivul în mod continuu mai mult de o oră.
- Depozitați în ambalajul original.
- A se păstra departe de apă și de căldură.

DATE TEHNICE

30 de viteze - 1800 - 3200 curse/min

Tensiune: curent continuu 16,8 V; putere

maximă: 150 W;

Putere efectivă: 100 W;

Baterie: litiu-ion;

Capacitatea bateriei: 2400

mAh; Timp de încărcare: 60-90

minute; Timp de lucru: 1-5

ore;

Nivelul de zgomot: 45-65 decibeli;

